

PROTETOR FACIAL FULL FACE GUARD FFG

NORMA ANSI.Z.87.1:2015

CA. XXXXX

INSTRUÇÕES DE USO PARA A MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL FULL FACE GUARD FFG
(TIPO FACE SHIELD)

DESCRIÇÃO:

Protetor facial para proteção de face contra impactos de partículas volantes.

Protetor facial tipo face shield destinado à proteção do rosto, olhos, nariz e boca, com face de proteção em PETG 0.5mm com 98% de transparência, e arnês em PEAD para estabilização da superfície de proteção.

Possui espuma de EVA de 3mm para conforto do usuário, e elástico de 20mm para ajuste e fixação no usuário.

O modelo FFG é basculante, SEM FIXAÇÃO na posição levantado justamente para garantir que o usuário esteja sempre protegido durante o seu uso.

INDICAÇÕES:

O face shield FFG é indicado para proteção do usuário de partículas volantes de baixo impacto e respingos de líquidos contaminantes.

DIFERENCIAIS:

O **face shield FFG** pode ser reutilizado, bastando que seja feita a limpeza do mesmo com produtos desinfetantes de uso comum (álcool, cândida, etc.). EVITAR UTILIZAR REMOVEDORES.

Possui regulagem da tensão do elástico de fixação, o que dá mais conforto ao usuário.

O material da face de proteção possui propriedade antiembaçante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE USO, CONSERVAÇÃO E VIDA ÚTIL:

Recomendamos que todo produto, ao ser retirado da embalagem, e antes do uso, seja inspecionado com o objetivo de verificar se há qualquer falha construtiva, e em caso afirmativo o material não deve ser utilizado.

Para usar o FFG, sugerimos a seguinte ordem:

1. Retirar o FFG da embalagem;
2. Higienizar as mãos;
3. Remover as películas da face de proteção (dois lados);
4. Realizar a montagem, inserindo a extremidade solta no orifício de fixação, conforme ilustração do manual de montagem;
5. Vestir na cabeça, e gentilmente ajustar o elástico, puxando-o até atingir uma pressão confortável na cabeça do usuário;
6. E pronto. Você está protegido.

No processo de limpeza / desinfecção, evitar usar materiais abrasivos para evitar riscos na superfície transparente, o que pode deteriorar a transparência / durabilidade do equipamento.

Se utilizado para proteção de partículas volantes, recomendamos a limpeza uma vez por dia. Se utilizado para proteção de gotículas de material possivelmente infectante recomendamos a desinfecção do visor, a cada paciente atendido.

Desejável armazenar em local limpo, fresco e ao abrigo da luz do sol e intempéries. A exposição à umidade, ou a variações de temperaturas extremas, por longos períodos de tempo podem afetar a durabilidade do face shield.

Respeitadas as recomendações, o prazo de validade / vida útil deste produto é de 5 anos.


Recomenda-se a troca do visor sempre que o mesmo perder transparência por excesso de riscos.

Transportar, evitando segurar no visor transparente.


Este EPI pode e deve ser utilizado com outros EPIs como máscara cirúrgica e / ou óculos em geral, não sendo incompatível com outros EPIs.

Todos os materiais usados na confecção deste EPI são hipoalergênicos, não contendo substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.


MANUAL DE MONTAGEM:

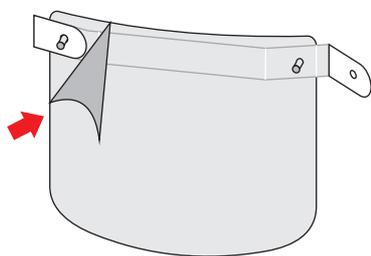

ORDEM 3.

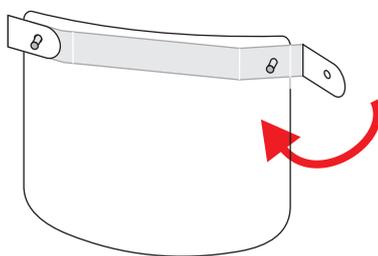

ORDEM 4.

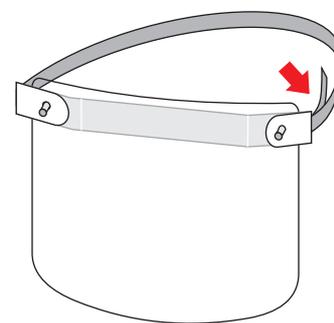

ORDEM 5.

TESTES E NORMAS TÉCNICAS:

Este produto foi testado no IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, de acordo com a norma ANSI Z87.1:2015, e os resultados para os testes podem ser vistos no endereço <http://www.fullfaceguard.com.br/ipt>

NORMA: ANSI Z87.1-2015

ANSI Z87.1-2015, 5.1.1 e 9.1 - Qualidade Óptica

ANSI Z87.1-2015, 5.1.2 e 9.2 - Transmitância Luminosa

ANSI Z87.1-2015, 5.1.4, 9.4 e 9.5 - Poder Refrativo, astigmatismo, poder de resolução, prisma e prisma balanceado

ANSI Z87.1-2015, 5.2.1 e 9.6 - Resistência ao impacto por queda de esfera

ANSI Z87.1-2015, 6.1.3 e 9.10 - Cobertura Lateral

ANSI Z87.1-2015, 5.2.2 e 9.7 - Ignição

ANSI Z87.1-2015, 5.2.4 - Área mínima de cobertura

ANSI Z87.1-2015, 5.3.1 - Marcações requeridas no protetor

ANSI Z87.1-2015, 5.3.2 - Locais de marcação

NR nº 6 - Verificação da Marcação

Portaria nº 452, item 4 - Informações da Embalagem do Produto

DADOS DE CONTATO:

ONZE BRASIL

CNPJ: 17.080.669/0001-33

contato@fullfaceguard.com.br

SAC: (11) 2659-2020